


إرشادات الاستعمال الخاصة بـ دوسيرايروسول

التنظيف:

امسح قطعة الفم من الخارج ومن الداخل مرة واحدة في الأسبوع بمنديل جاف (من دون ماء).

التخزين:

لا تقم بالتخزين في درجة حرارة تفوق 25 م° ولا تعرضه للشمس أو للصقيع.

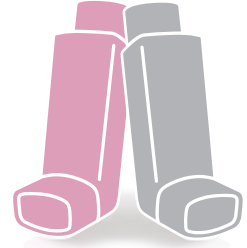

الاستنشاق الصحيح خطوة بخطوة



إنزفريبطء وعمق - لا تنفخ داخل جهاز الاستنشاق.



الرجاء فحص جهاز الاستنشاق قبل الاستعمال. اسحب بعدها الغطاء الواقي من قطعة الفم ثم تأكد من خلو قطعة الفم من أي أجسام غريبة.



اضغط على خرطوشة الدواء نحو الأسفل لإطلاق الجرعة بينما أنت تستنشق الهواء في نفس الوقت ببطء وبعمق عن طريق الفم.




امسك جهاز الاستنشاق بالإبهام أو السبابة مع الأصبع الأوسط (كما في الصورة). ضع قطعة الفم داخل الشفتين وأطبق عليها مع جعل رأسك مائلا قليلا إلى الخلف.



تنفس ببطء من خلال الأنف أو من خلال الشفاه وهي شبه مغلقة (إطباق الشفاه). ضع الغطاء الواقي على الجهاز وافحص عداد الجرعات مجددا. والذي يعد بشكل تنازلي مع كل عملية ضخ. قبل القيام بعملية الضخ المقبلة، ثبت جهاز الاستنشاق في وضع مستقيم لمدة نصف دقيقة تقريبا وأعد الخطوات 2 إلى 6.



احبس الهواء من 5 إلى 10 ثواني أو بالقدر الذي تستطيع وبشكل لا يجهدك. بعد ذلك اسحب جهاز الاستنشاق من الفم.

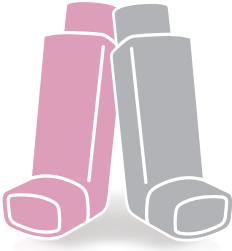


التنظيف والتخزين

من أجل الحصول على أداء وظيفي صحيح لجهاز الاستنشاق بالجرعات المقننة قمنا بتحضير بعض المعلومات المهمة لك:

التنظيف



✓ الفوهة نظيفة

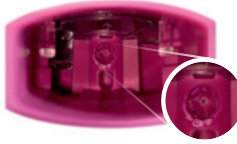

الفوهة مسدودة

قم بتنظيف مبسم الفم من الجهاز مرة واحدة في الأسبوع على الأقل باستخدام قطعة قماش جافة وذلك بعد الاستنشاق مباشرة، وبشكل خاص يجب تنظيف فوهة مخرج الرذاذ من الداخل.



لا يوجد ماء!

يمكن أن يشكل المكون بيكلوميثازون ديبروبونات Beclometasondipropionat بلورات بيضاء غير قابلة للذوبان بسبب الرطوبة وتستقر كترسيبات عنيدة في فوهة مخرج البخاخ. هذه البلورات تنتج عادةً عن الزفير في جهاز الاستنشاق أو عن التنظيف غير الكافي لمبسم الفم البلاستيكي أو عن طريق التخزين غير الصحيح.

التخزين

يجب قبل الاستخدام الأول تخزين جهاز الاستنشاق بالجرعات المقننة (والعبوات المتعددة) في الثلاجة (عند درجة حرارة 2-8 درجة مئوية).

قم بعد الاستخدام الأول بتخزين جهاز الاستنشاق بالجرعات المقننة في درجة حرارة الغرفة (بحد أقصى 25 درجة مئوية) وفي أقل رطوبة ممكنة. الرجاء عدم تخزينه في الحمام أو المطبخ وعدم وضعه في الثلاجة.

يمكنك الحصول على المعلومات التفصيلية من نشرة العبوة أو اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الصيدلي.

لديك جهاز استنشاق وردي اللون؟

يمكنك أيضًا العثور على فيديو توضيحي حول طريقة التنظيف الأمثل هنا:



لديك جهاز استنشاق رمادي اللون؟

يمكنك أيضًا العثور على فيديو توضيحي حول طريقة التنظيف الأمثل هنا:

