



Instrucciones de uso para el inhalador con dosificador

Limpieza:

Limpie el exterior y el interior de la boquilla una vez a la semana con un paño seco (sin agua).

Almacenamiento:

No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni exponerlo al sol o a temperaturas extremadamente bajas.

Cómo inhalar correctamente paso a paso



Por favor, verifique el contador de dosis antes de la inhalación, quite la tapa protectora de la boquilla y asegúrese de que la boquilla esté libre de cuerpos extraños.



Exhale de forma lenta y profunda – no respire hacia el interior del inhalador.



Sostenga el inhalador con el pulgar y el dedo índice o medio (como se muestra). Rodee la boquilla con los labios e incline ligeramente su cabeza hacia atrás.



Presione la parte superior del inhalador hacia abajo para liberar una dosis mientras inspira de manera profunda y lenta por la boca.



Contenga la respiración durante 5–10 segundos o el tiempo que le sea posible sin esfuerzo. A continuación, retire el inhalador de su boca.



Exhale lentamente por la nariz o por los labios casi cerrados (frenado labial). Vuelva a colocar la tapa protectora y verifique nuevamente el contador de dosis, que cuenta hacia abajo con cada uso. Para un segundo uso, mantenga el inhalador en posición vertical durante aproximadamente medio minuto y luego repita los pasos del 2 al 6.



Limpieza y almacenamiento

Con el fin de asegurar un funcionamiento correcto del inhalador con dosificador, le facilitamos a continuación información importante:



Limpie la boquilla al menos una vez por semana, justo después de la inhalación, con un paño seco. Asegúrese de limpiar especialmente detenidamente la salida del aerosol en el interior de la boquilla.

¡No use agua!



Salida obstruida



Salida limpia ✓

El agente activo dipropionato de beclometasona puede formar cristales blancos insolubles por el contacto con la humedad. Estos pueden adherirse persistentemente a la salida del aerosol y provocar obstrucciones.

Las causas más frecuentes son: Exhalar hacia el interior del inhalador, una limpieza insuficiente de la boquilla o un almacenamiento incorrecto.



Antes del primer uso: conservar el aerosol (también los envases múltiples) en el frigorífico (entre 2-8 °C).

Después del primer uso: conservar el aerosol a temperatura ambiente (25 °C máx.) y en un lugar seco. Se ruega no guardarlo en el baño o la cocina. No vuelva a colocarlo en el frigorífico una vez usado.

Para más información detallada, consulte el prospecto incluido en el envase o consulte a su médico/a o en su farmacia.

¿Dispone de un inhalador gris?

Aquí encontrará un vídeo detallado que muestra cómo realizar una limpieza óptima:



¿Dispone de un inhalador rosa?

Aquí encontrará un vídeo detallado que muestra cómo realizar una limpieza óptima:

