

Conseils d'utilisation pour l'aérosol-doseur



Nettoyage:

Essayez les surfaces intérieure et extérieure de l'embout buccal une fois par semaine avec un chiffon sec (pas d'eau).

Conservation:

Ne pas stocker à plus de 25 °C ni exposer aux rayons directs du soleil ou au gel.

Comment inhaler correctement



1 Vérifiez le compteur de doses avant chaque inhalation, retirez ensuite le capuchon de l'embout et assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se trouve dans l'embout buccal.



2 Respirez lentement et profondément sans expirer dans l'aérosol-doseur.



3 Tenez l'aérosol-doseur entre le pouce et l'index ou le majeur (cf. illustration). Placez vos lèvres autour de l'embout et inclinez votre tête légèrement vers l'arrière.



4 Tout en inspirant profondément et lentement par la bouche, enfoncez la cartouche contenant le principe actif vers le bas pour déclencher la dose.



5 Retenez votre souffle pendant 5 à 10 secondes ou aussi longtemps que possible sans forcer. Retirez ensuite l'aérosol-doseur de votre bouche.



6 Respirez lentement par le nez ou entre les lèvres quasi-fermées (les lèvres freinent l'air). Remettez le capuchon en place et vérifiez à nouveau le compteur de doses, qui décompte les doses à rebours. Pour inhaler une seconde dose, tenez l'aérosol-doseur à la verticale pendant environ 30 secondes, puis répétez les étapes 2 à 6.




Nettoyage et stockage

Nous avons réuni ici quelques informations importantes pour le bon fonctionnement de nos aérosols-doseurs :



Nettoyer au moins une fois par semaine l'extérieur de l'embout buccal et surtout l'intérieur de la buse de sortie du pulvérisateur avec un chiffon sec, directement après l'inhalation.

Pas d'eau !

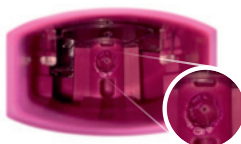

Buse colmatée



Buse propre ✓

La substance active dipropionate de béclométazone peut former des cristaux blancs insolubles en présence d'humidité et se déposer sous forme de dépôt tenace dans la buse de sortie du pulvérisateur. Ces cristaux apparaissent généralement en raison de l'expiration dans l'inhalateur, d'un nettoyage insuffisant de l'embout buccal en plastique ou d'un stockage incorrect.



Avant la première utilisation, il faut conserver l'inhalateur-doseur (ainsi que les emballages multiples) au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C).

Après la première utilisation, conservez l'inhalateur-doseur à température ambiante (jusqu'à 25 °C maximum) et à un taux d'humidité aussi faible que possible. Ne pas stocker dans la salle de bain ou la cuisine et ne pas remettre au réfrigérateur.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la notice d'emballage ou demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous avez un aérosol doseur gris ?

Vous trouverez ici une vidéo détaillée montrant comment effectuer un nettoyage optimal :



Vous avez un aérosol doseur rose ?

Vous trouverez ici une vidéo détaillée montrant comment effectuer un nettoyage optimal :

