



Указания по применению дозированной аэрозоль

Очищение:

1 раз в неделю протирайте внешнюю и внутреннюю поверхность мундштука сухой тканью (не промывать водой!).

Хранение:

Хранить при температуре не выше 25 °С и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или холода.

Правильная ингаляция шаг за шагом



1
Перед вдыханием проверьте счетчик доз, затем снимите защитный колпачок с мундштука и убедитесь, что мундштук не содержит инородных тел.



2
Сделайте медленный глубокий выдох – но не в ингалятор.



3
Держите ингалятор указательным и большим пальцами (как показано). Возьмите мундштук в рот, плотно обхватив его губами, и слегка наклоните голову назад.



4
Нажмите на металлический баллончик до распыления, одновременно производя глубокий медленный вдох через рот.



5
Задержите дыхание на 5–10 секунд или насколько это возможно без усилий. В заключение извлеките ингалятор из рта.



6
Сделайте медленный выдох через нос или неплотно сжатые губы (без препятствия губ). Без препятствия губ. Вставьте защитный колпачок и перепроверьте счетчик дозы, который производит обратный отчет при каждом распылении. Для второго распыления держите ингалятор вертикально около тридцати секунд, затем повторите шаги 2–6.




Очистка и хранение

Чтобы обеспечить правильную работу наших дозированных аэрозолей, мы собрали для Вас важную информацию:



Очищайте внешнюю поверхность мундштука **сухой тканью** не реже одного раза в неделю, непосредственно после ингаляции, особенно тщательно внутреннюю часть выходного мундштука спрея.

Не использовать воду!

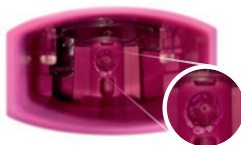

Мундштук засорен



Мундштук очищен ✓

Действующее вещество беклометазона дипропионат может образовывать нерастворимые белые кристаллы под воздействием влаги и оседать в виде труднорастворимого осадка в выходном мундштуке спрея. Обычно они образуются в результате выдоха в ингалятор, недостаточной очистки пластикового мундштука или неправильного хранения.



Перед первым использованием храните дозированный ингалятор (и мультиупаковки) в холодильнике (при температуре 2–8 °C).

После первого использования храните используемый дозированный ингалятор при комнатной температуре (макс. до 25 °C) и как можно более низкой влажности. Пожалуйста, не храните в ванной или на кухне и не кладите обратно в холодильник.

Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции по применению или спросите Вашего врача либо фармацевта.

У Вас серый дозированный аэрозоль?

Наглядное видео об оптимальной очистке вы также можете найти здесь:



У Вас розовый дозированный аэрозоль?

Наглядное видео об оптимальной очистке вы также можете найти здесь:

