


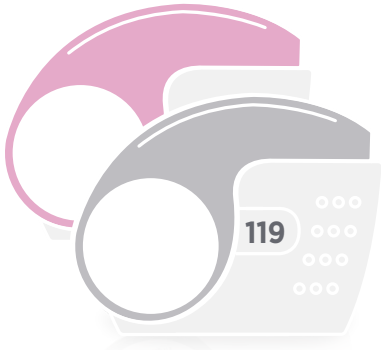

Instrucciones de uso para el NEXThaler®

Limpieza:

Limpie la boquilla del inhalador una vez a la semana con un paño seco (sin agua).

Almacenamiento:

No almacenar a temperaturas superiores a 25° C.

No exponga el inhalador a un ambiente húmedo o mojado.

Cómo inhalar correctamente paso a paso

1



Abierto

120

Verifique el contador antes de usarlo.

Un valor entre „1“ y „120“ indica que aún hay dosis disponibles en el NEXThaler®. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada antes de usar el inhalador. Mantenga su inhalador firmemente en posición vertical. Ahora abra completamente la tapa (se escuchará un clic). Exhale tan profundamente como sea posible sin soplar dentro del inhalador.

2



Inhalar

Lleve el inhalador a su boca, rodee firmemente la boquilla con sus labios. Asegúrese de no cubrir la entrada de aire mientras sostiene el inhalador. Inhale rápida y profundamente. Escuchará un sonido de clic, continúe inhalando profundamente. Luego, retire el inhalador de su boca y mantenga la respiración durante 5 a 10 segundos o tanto como le sea posible sin esfuerzo.

Después, exhale lentamente. No exhale dentro de su inhalador.

3



Cerca

Vuelva a colocar su inhalador en posición vertical y cierre completamente la tapa.

119

Verifique si el contador de dosis muestra una menos. Si no es así, consulte a su médico o farmacéutico para revisar su técnica de inhalación y/o el estado del dispositivo. Si necesita otra dosis, repita los pasos 1 a 3.