



NEXThaler® kullanım bilgileri

Temizleme:

İnhalerin ağızlığını haftada bir kere kuru bir bezle (su kullanmadan) silin.

Saklama:

25 °C üstünde sıcaklıktan koruyun. İnhalerinizi nemli veya ıslak ortamlarda bırakmayın.

Doğru inhalasyonu adım adım öğrenelim

1



Açılış

120

Kullanmadan önce sayacı kontrol edin. “1” ile “120” arasında bir değer NEXThaler® içinde kaç doz bulunduğunu gösterir.

İnhaler kullanılmadan önce kapağının iyice kapalı olduğundan emin olun.

İnhaleri dik durumda sıkıca tutun. Şimdi kapağı tamamen açın. Mükün olduğu kadar derin nefes verin (işitilir bir tıkırtı). Bunu yaparken nefesinizi inhalerin içine vermeyin.

2



İnhalasyon

İnhaleri ağızınıza götürün, ağızlığı dudaklarınızla sıkıca kavrayın. İnhaleri tutarken hava girişini kapatmamaya dikkat edin. Hızlı ve derin bir nefes alarak ilacı inhale edin. Bir tıkırtı duyacaksınız. Buna aldırmanın ve derin nefes almaya devam edin.

Sonra inhaleri ağızınızdan çekin, nefesinizi 5-10 saniye, veya yorulmadan tutabildiğiniz kadar tutun.

Sonra yavaş yavaş nefes verin. Nefesinizi inhalerin içine vermeyin.

3



Kapanış

İnhaleri tekrar dik duruma getirin ve kapağını iyice kapayın.

119

Sayacın bir doz eksik gösterdiğinden emin olun. Böyle değilse, inhalasyon tekniğini değerlendirmesi için hekiminize başvurun veya eczacınızdan cihazın durumunu kontrol etmesini rica edin. Bir doz fazlası gerekiyorsa 1.-3. adımları tekrarlayın.